

GALAIR GA-21/1001

CE 0370 FFP2 NR

EN 149:2001+A1:2009

FFP2 NR

**Media Mscara
Autofiltrante**

GA-21/1001 cumple con el Reglamento (UE) 2016/425, con las especificaciones en la Norma **EN 149:2001+A1:2009**.

Dispositivo de protecci3n respiratoria.

La media mscara autofiltrante, est formada por 5 capas, son muy ligeras, c3micas y ofrecen baja resistencia a la respiraci3n. Ha sido certificada por LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS). Organismo Notificado 0370 con sede en Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra (Barcelona).

Se recomienda al usuario que lea atentamente y que siga las instrucciones de uso. El tiempo de uso no debe exceder ms de un turno de trabajo de 8 horas. No lavable.

**MEDIA MSCARA AUTOFILTRANTE DE UN SOLO USO.
VIDA TIL: 2 AOS.**



Gantex Studio S.L.

Bergazos, 36 | 36519 Laln
(Pontevedra) Tlf.986 794 203

www.galair.es

GALAIR

Fabricado en Espaa

FFP2 NR

Media Máscara Autofiltrante GA-21/1001

La media máscara autofiltrante GALAIR GA-21/1001 es un dispositivo de protección individual FFP2 y cumple con el **Reglamento de la UE 2016/425** con las especificaciones de las normas **EN 149:2001+A1:2009**

INSTRUCCIONES DE USO



1 Antes de ponerse una mascarilla lávese las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

Despliegue la máscara, dé forma a la pieza de la nariz doblándola ligeramente y coloque la máscara en la parte inferior de la barbilla.



3 Ahora tire de las gomas sobre sus orejas. Ajuste la máscara para que se ajuste cómodamente en la cara.

Ajuste el clip nasal a la forma de la nariz con ambas manos. Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal ni la parte interior que está en contacto con la cara, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.



ADVERTENCIAS

- La media máscara autofiltrante tipo FFP2 ha sido diseñada para proteger de forma eficaz partículas en suspensión.
- Verifique que la colocación de la mascarilla es correcta e inspeccione la mascarilla antes de usar, la protección respiratoria sólo es efectiva si se ajusta y usa adecuadamente.
- Realice comprobaciones de sellado, realizando respiraciones enérgicas para detectar si se producen fugas de aire, en caso de que estas existieran, indicaría que el ajuste no es correcto.
- No utilizar la media máscara filtrante si la concentración de oxígeno es inferior al 19,5%.
- No está permitido el uso en atmósferas explosivas. No utilizar la media máscara filtrante en presencia de contaminantes desconocidos, gases o vapores. Este producto no es resistente a las llamas y no debe utilizarse en áreas con llamas abiertas.
- El tiempo de uso no debe exceder más de un turno de trabajo de 8 horas. No lavable.